



Notice abrégée pour ton NutropinAq® Pen



Cette notice t'aide à utiliser ton stylo injecteur NutropinAq® correctement

Les étapes suivantes servent à la préparation de ton stylo pour sa première utilisation, tes parents vont t'aider

Préparation du stylo / Mise en place d'une nouvelle ampoule



1 Tire le couvercle de protection vert du stylo et dévisse le support de l'ampoule cylindrique.

2 Appuie sur la touche blanche de réinitialisation.



4 Tourne maintenant le bouton doseur noir légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tu entendes un clic et appuie sur le bouton doseur noir jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'affichage numérique de la dose doit maintenant afficher deux barres.



3 Tourne le bouton doseur noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il arrive en butée.



5 Insère maintenant l'ampoule cylindrique de NutropinAq® dans le support d'ampoule cylindrique et revisse le support d'ampoule cylindrique rempli dans le stylo.

Si l'ampoule cylindrique est déjà en place dans ton stylo, c'est très simple !

Pour une injection quotidienne, ne répéter que les étapes 6 à 12 !



6 Appuie sur la touche blanche de réinitialisation.



8 Paramètre ta dose en tournant le bouton doseur noir dans le sens des aiguilles d'une montre. Si tu as paramétré une dose trop élevée, il te suffit de tourner le bouton doseur dans le sens inverse jusqu'à parvenir au bon réglage.

Le réglage de la dose



7 L'affichage numérique de la dose passe lors de la première utilisation des deux barres à un affichage clignotant indiquant 0,0 mg. Si l'ampoule cylindrique a déjà été utilisée, alors c'est la dose de la veille qui s'affiche en clignotant ; l'affichage repasse rapidement à 0,0 mg. Il est maintenant possible de paramétrer à nouveau la dose.



Tom t'explique en ligne comment utiliser le stylo NutropinAq® Pen correctement



www.wirwollenwachsen.com

NOTICE ABRÉGÉE



9 Essuie à présent les bouchons en caoutchouc avec une lingette imbibée d'alcool. Visse une aiguille neuve sur le stylo et retire prudemment les deux capuchons de protection de l'aiguille.

Le guide-aiguille



10 Tu as la possibilité d'utiliser ton stylo avec ou sans guide-aiguille. Le guide-aiguille recouvre l'aiguille d'injection pendant l'injection et la protège de tout dommage. Place le guide sur le stylo et fais glisser les deux boutons vers l'avant.

L'injection



11 Pince la peau et pose l'aiguille dessus. Si tu utilises le guide-aiguille, presses le stylo vers le bas jusqu'à ce que le guide-aiguille se rétracte et que l'aiguille pique la peau. Sinon, pique simplement l'aiguille directement dans la peau. Appuie lentement sur le bouton doseur jusqu'à ce qu'il s'enclenche et attends 10 secondes. Tu peux ensuite retirer ton stylo.



12 Tu as réussi ! Il ne te reste plus qu'à dévisser l'aiguille, mettre le capuchon de protection et remettre le stylo dans son étui au réfrigérateur !

COMPOSANTS



Affichage numérique de la dose



Bouton doseur noir



Touche blanche de réinitialisation

-
- 📦 Ton stylo NutropinAq[®] Pen a été spécialement conçu pour l'injection de NutropinAq[®].
 - 📦 N'utilise pas ton stylo NutropinAq[®] Pen sans avoir reçu au préalable les instructions d'une personne qualifiée. Si tu as des difficultés avec le stylo, consulte la personne qui t'a expliqué son fonctionnement.
-

Place ton stylo NutropinAq® Pen ici pour procéder à l'injection :



IMPORTANT !



Tu dois changer chaque jour de site d'injection !

Ainsi, la peau est préservée étant donné que l'on ne pique pas au même endroit deux jours d'affilée.

— Ne pas choisir un site d'injection sur le ventre trop proche du nombril

— Sites d'injection sur la cuisse

! ASTUCE : Piquer à droite les jours pairs et à gauche les jours impairs.

- ➡ Conserver le stylo et l'ampoule cylindrique au réfrigérateur à l'abri de la lumière (ne pas congeler !). La solution contenue dans l'ampoule cylindrique est stable jusque 28 jours après ouverture si elle est conservée entre 2 et 8°C.
- ➡ Le stylo et l'ampoule cylindrique peuvent être retirés du réfrigérateur jusque 45 minutes avant l'utilisation.
- ➡ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant chaque injection.
- ➡ Utiliser l'aiguille d'injection une seule fois.
- ➡ Ne pas retirer l'ampoule cylindrique du stylo entre les injections.
- ➡ Pour nettoyer le stylo, utiliser un linge humide. Ne le plonger en aucun cas dans l'eau. Ne pas utiliser d'alcool.
- ➡ Pour nettoyer l'ampoule cylindrique, utiliser exclusivement des lingettes imbibées d'alcool.

NUT-AT-000231