



NutropinAq® Pen için kısa kullanım kılavuzu



NutropinAq® Pen'ini doğru kullanmanda sana yardımcı olur

Aşağıda gösterilen adımlar NutropinAq® Pen'in ilk kullanım için hazırlanmasını sağlar – Ailen sana bu konuda yardımcı olacaktır

Kalemin hazırlanması / Yeni bir ampulün yerleştirilmesi



1 Kalemin yeşil koruyucu kapağını çek ve silindir ampul haznesini çevirerek çıkar.

2 Beyaz geri alma tuşuna bas.



4 Şimdi siyah dozaj düğmesini ilk “klik” sesini duyana kadar saat yönünde çok az çevir ve yerine oturana kadar siyah dozaj düğmesine bas. Dijital doz göstergesi şimdi 2 çizgi göstermelidir.



3 Siyah dozaj düğmesini son raddeye kadar saat yönünün tersine çevir.



5 Şimdi NutropinAq® silindir ampulü silindir ampul haznesine yerleştir ve doldurulmuş olan silindir ampul haznesini çevirerek tekrar kalemin içine tak.

Silindir ampul kalemin içine yerleştirildikten sonra gerisi çok kolaydır!

Günlük enjeksiyonlarında sadece 6. ila 12. adımları tekrarlayan gerekmektedir!



6 Beyaz geri alma tuşuna bas.



8 Siyah dozaj düğmesini saat yönünde çevirerek dozunu ayarla. Eğer dozu çok yüksek ayarladıysan, doğru ayarı elde edene kadar siyah dozaj düğmesini geri çevir.

Dozun ayarlanması



7 İlk kullanımda dijital doz göstergesindeki iki çizginin yerini yanıp sönen 0,0 mg ibaresi alır. Silindir ampul daha önce kullanılmışsa, yanıp sönen göstergede bir önceki günün dozu gösterilir; gösterge kısa bir süre sonra 0,0 mg ibaresini göstermeye başlar. Şimdi doz yeniden ayarlanabilir.



Tom sana çevrimiçi olarak, NutropinAq® Pen'in nasıl doğru kullanılacağını açıklıyor



www.wirwollenwachsen.com

Kısa kullanım kılavuzutu



9 Şimdi lastik tapayı alkollü bir bezle sil. Yeni bir iğneyi çevirerek kaleme tak ve dikkatlice her iki koruyucu başlığı da iğneden çıkar.

İğne kılavuzu



10 Kalemini iğne kılavuzu ile veya iğne kılavuzu olmadan kullanabilirsin. İğne kılavuzu enjeksiyon esnasında enjeksiyon iğnesinin üzerini kapatır ve böylece onun zarar görmesini önler. Kılavuzu kalemin üzerine yerleştir ve iki düğmeyi öne doğru ittir.

Enjeksiyon



11 Deriyi hafifçe sıkıştır ve kalemin ucunu buraya yerleştir. İğne kılavuzu kullanıyorsan kalemi, iğne kılavuzu katlanana ve iğne deriye girene kadar aşağıya bastır. Eğer kullanmıyorsan iğneyi doğrudan derine batır. Dozaj düğmesine yerine oturana kadar yavaşça bas ve 10 saniye bekle. Artık kalemi çekebilirsin.



12 Başardın! Şimdi yapman gereken tek şey iğneyi çevirerek tekrar çıkarmak, koruyucu kapağı takmak ve kalemi kutusunun içine yerleştirerek buzdolabına koymak!

Bileşenler



Dijital doz göstergesi



Siyah dozaj düğmesi



Beyaz geri alma tuşu

- NutropinAq[®] Pen, NutropinAq[®]'nin enjekte edilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.
- NutropinAq[®] Pen'i, eğitimli bir kişi sana bunun nasıl kullanılacağını açıklamadan önce kullanma. Kalemini kullanmakta zorluk çekiyorsan, lütfen sana kalemi açıklayan kişiye danış.

NutropinAq® Pen ile vücudunun bu bölgelerinden enjeksiyon yapabilirsin:



Önemli!



Enjeksiyon yerini her gün değiştirmelisin!

Böylece art arda gelen günlerde asla aynı yere enjeksiyon yapılmayacağı için deri korunmuş olur.

— Karın bölgesindeki enjeksiyon yerleri
göbek deliğine çok yakın olmamalıdır

— Uyluklardaki enjeksiyon yerleri

İpucu: Tek sayılı günlerde sağ tarafa, çift sayılı günlerde sol tarafa iğne yapabilirsin.

- ✦ Kalem ve silindir ampuller buzdolabında, ışık almayacak şekilde muhafaza edilmelidir (kesinlikle dondurulmamalıdır!). Silindir ampul içinde bulunan çözelti açıldıktan sonra 2-8°C sıcaklıkta 28 güne kadar kullanılabilir.
- ✦ Kalem ve silindir ampul, kullanımdan en fazla 45 dakika önce buzdolabından çıkarılabilir.
- ✦ Her enjeksiyon öncesinde eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
- ✦ Enjeksiyon iğneleri sadece 1x kullanılmalıdır.
- ✦ Enjeksiyonlar arasında silindir ampul kalemde çıkarılmamalıdır.
- ✦ Temizlemek için kalem sadece nemli bir bezle silinmelidir, kesinlikle suya batırılmamalı veya alkol kullanılmamalıdır.
- ✦ Silindir ampülü temizlemek için sadece alkollü bezler kullanılmalıdır.

NUT-AT-000228