



Kratka navodila za uporabo pripomočka NutropinAq® Pen



Pomaga ti pri pravilni uporabi
avtoinjektorja NutropinAq®

Naslednji prijemi so namenjeni pripravi pripomočka Nutropin® za prvo uporabo – starši ti bodo pri tem pomagali

Priprava pripomočka / vstavljanje nove ampule



1 Povleci zeleni zaščitni pokrovček s pripomočka in odvij nosilec cilindrične ampule.

2 Pritisni belo tipko za ponastavitev.



4 Zdaj zavrti črni dozirni gumb čisto malo v smeri urnega kazalca, da zaslišiš prvi klik, nato pa pritisni črni dozirni gumb, da se zaskoči. Digitalni prikaz odmerjanja mora zdaj prikazovati 2 črtici.



3 Zavrti črni dozirni gumb v nasprotni smeri urnega kazalca do omejila.



5 Zdaj vstavi cilindrično ampulo NutropinAq® v nosilec cilindrične ampule in privij napolnjeni nosilec cilindrične ampule znova v pripomoček.

Če je v tvoj pripomoček že vstavljena cilindrična ampula, je povsem preprosto!

Pri dnevnem vbrizgavanju se ponavljajo le koraki od 6 do 12!



6 Pritisni belo tipko za ponastavitev.



8 Nastavi odmerek, tako da zavrtiš črni dozirni gumb v smeri urnega kazalca. Če nastaviš preveliki odmerek, preprosto zavrti črni dozirni gumb nazaj na pravo nastavitev.

Nastavljanje odmerka



7 Digitalni prikaz odmerjanja pri prvi uporabi preklopi iz dveh črtic na utripajoči prikaz z 0,0 mg. Če je cilindrična ampula že v uporabi, potem bo z utripajočim prikazom prikazan odmerek prejšnjega dne; prikaz kmalu preklopi na 0,0 mg. Zdaj je mogoče na novo nastaviti odmerek.



Tom ti na spletu razloži, kako pravilno uporabljaš injekcijsko pero NutropinAq®



www.wirwollenwachsen.com

Kratka navodila



9 Zdaj obriši gumijasti čep z alkoholno krpico. Privij svežo iglo na pripomoček in previdno povleci oba zaščitna pokrovčka z igle.

Vodilo igle



10 Obstaja možnost uporabe pripomočka z vodilom igle ali brez njega. Vodilo igle zakriva vbrizgalno iglo med vbrizgavanjem in jo ščiti pred poškodbami. Nastavi vodilo na pripomoček in potisni oba gumba naprej.

Vbrizgavanje




11 Stisni kožo in nanjo položi konico pripomočka. Če uporabljaš vodilo igle, pritisni pripomoček navzdol, dokler se vodilo igle ne stisne skupaj in igla prebode kožo. Sicer pa zapichiš iglo neposredno v kožo. Počasi pritisni dozirni gumb navzdol, da se zaskoči, in počakaj 10 sekund. Nato lahko odstraniš pripomoček.



12 Končano! Zdaj moraš le še odviti iglo, namestiti zaščitni pokrovček in pripomoček v etuiju odložiti v hladilnik!

Sestavni deli

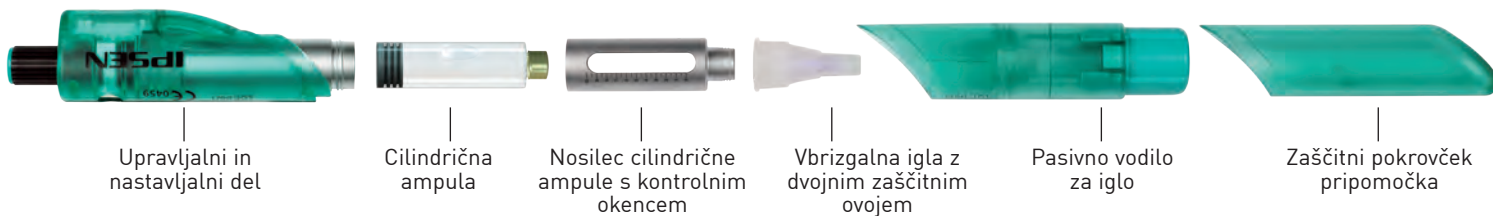

Digitalni prikaz odmerjanja



Črni dozirni gumb



Bela tipka za ponastavitev

-
- Pripomoček NutropinAq[®] smo razvili posebej za brizganje zdravila NutropinAq[®].
 - Svojega pripomočka NutropinAq[®] ne uporablaj brez predhodnih navodil usposobljene osebe. Če imaš težave s pripomočkom, se takoj obrni na osebo, ki ti je razložila uporabo pripomočka.
-

Tukaj nastavi pripomoček NutropinAq® za vbrizgavanje na telo:



Pomembno!



Mesto vbrizgavanja moraš zamenjati vsak dan!

S tem boš prizanesel koži, ker ne boš v zaporednih dneh nikoli vbrizgaval na istem mestu.

— Mesta vbrizgavanja v predelu trebuha,
ne preblizu popka

— Mesta vbrizgavanja na stegnih



Nasvet: Ob dnevih s sodim datumom vbrizgavaj desno, ob dnevih z lihim datumom pa levo.

-  Pripomoček in cilindrične ampule hrani v hladilniku in zaščiteno pred svetlobo (v nobenem primeru ne sme zmrzniti!). Pri 2–8 °C je raztopina v cilindrični ampuli do 28 dni po začetku uporabe stabilna.
-  Pripomoček in cilindrično ampulo lahko vzameš iz hladilnika do 45 minut pred uporabo.
-  Pred vsakim vbrizgavanjem si temeljito umij roke z vodo in milom.
-  Vbrizgalne igle uporabi le 1-krat.
-  Cilindrične ampule med posameznimi vbrizgavanji ne odstrani iz pripomočka.
-  Pri čiščenju pripomoček le obriši z vlažno krpo – v nobenem primeru ga ne potaplaj v vodo ali alkohol.
-  Za čiščenje cilindrične ampule uporablaj le alkoholne krpice.

NUT-AT-000229