

الدليل المختصر لاستخدام قلم NutropinAq® Pen

التعرف على
طريقة النمو



يساعدك هذا الدليل على استخدام قلم NutropinAq® بطريقة صحيحة

تعمل المقابض التالية على مساعدتك في إعداد قلم NutropinAq® Pen الخاص بك في أول استخدام - والداك سيساعدانك في ذلك

تحضير القلم / تركيب أمبولة جديدة

٤ قم الآن بتدوير زر الجرعة الأسود قليلاً جداً في اتجاه عقارب الساعة حتى سماع أول طقة، ثم اضغط على الزر الأسود إلى أن يستقر في موضعه. ينبغي أن يقوم عارض الجرعة الرقمي عندئذ بعرض شرطتين.



١ اسحب غطاء الحماية الأخضر من القلم، وقم بتدوير حامل الأمبولة الاسطوانية لفكه.



٢ اضغط على زر إعادة الضبط أبيض اللون.

٥ ضع الآن الأمبولة الاسطوانية NutropinAq® في حامل الأمبولة الاسطوانية، واربط الحامل المعبأ في القلم مرة أخرى.



٣ أدر زر الجرعة الأسود عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف عن الحركة.



إذا تم إدخال الأمبولة الاسطوانية بالفعل في القلم، فسيصبح الأمر في غاية البساطة واليسر! عند قيامك بالحقن يوميًا، تُكرر الخطوات ٦ إلى ١٢ فقط!

٨ اضغط جرعتك من خلال تدوير زر الجرعة الأسود في اتجاه عقارب الساعة. وفي حالة قيامك بضبط جرعة كبيرة للغاية، قم ببساطة بتدوير زر الجرعة الأسود حتى يعود إلى موضع الضبط الصحيح.



٦ اضغط على زر إعادة الضبط أبيض اللون.



ضبط الجرعة

٧ يقفز عارض الجرعة الرقمي، عند الاستخدام لأول مرة، من الشرطة الثانية إلى عرض وامنض يشير إلى ٠,٠ ملليجرام. وإذا كانت الأمبولة الاسطوانية مستخدمة بالفعل، فسيتم بعد ذلك عرض جرعة اليوم السابق بالعرض الوامنض، وبعد وقت قصير سيتحول العرض إلى ٠,٠ ملليجرام. عندئذ يمكن إعادة ضبط الجرعة.



يوضح لك توم عبر الانترنت كيف تستخدم NutropinAq® Pen بشكل صحيح.



www.wirwollenwachsen.com



الدليل المختصر

الحقن

١١ اضغط الجلد معًا، وضع حقنة القلم عليه. وفي حالة استخدام مسار توجيه الإبرة، اضغط القلم إلى أسفل إلى أن يتداخل المسار، وتنغرس الإبرة في الجلد. أو بخلاف ذلك، يمكنك وخز الإبرة في جلدك مباشرة. اضغط زر الجرعة إلى أسفل ببطء إلى أن يستقر وانتظر لمدة ١٠ دقائق. ثم يمكنك بعد ذلك سحب القلم للخارج.



٩ امسح الآن السدادة المطاطية بمنديل كحول. اربط إبرة جديدة بالقلم، واسحب غطاء الحماية من الإبرة بحذر.



مسار توجيه الإبرة


١٢ **تم الأمر!** ينبغي الآن تدوير الإبرة لإخراجها مرة أخرى، وتركيب غطاء الحماية، ووضع القلم في علبة الحفظ في المبرد!



١٠ تتوفر لديك إمكانية استخدام القلم مع مسار توجيه الإبرة أو بدونه. يقوم مسار توجيه الإبرة بتغطية إبرة الحقن أثناء عملية الحقن، كما يحميها من التلف. ضع المسار على القلم واضغط الزران إلى الأمام.



الأجزاء

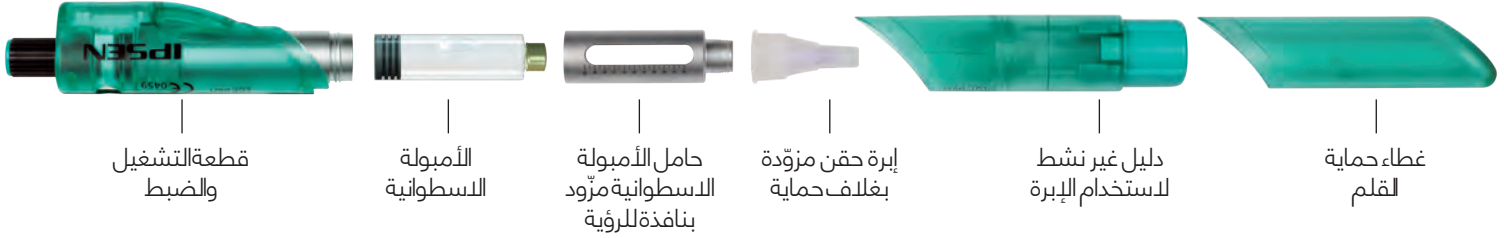

لقد تم تطوير قلم NutropinAq® Pen الخاص بك خصيصًا لحقن NutropinAq®.

لا تستخدم قلم NutropinAq® Pen بدون الحصول على توجيه مسبق من شخص مُدرَّب. وإذا واجهت صعوبات في استخدام قلمك، فرجاء التوجّه فورًا للشخص الذي وضع لك كيفية استخدام القلم.

عارض رقمي للجرعة



زر الجرعة أسود اللون



زر إعادة الضغط أبيض اللون

رَّكِب قلم NutropinAq® Pen هنا للحقن في جسمك:

ينبغي عليك تغيير موضع الحقن يوميًا!

وبذلك يتم حماية الجلد، بحيث لا يتم الحقن نهائيًا في أيام متتالية في نفس الموضع.

مواضع الحقن في منطقة المعدة
على غير مقربة من السرة

مواضع الحقن في الفخذين



نصيحة: يتم الحقن يوميًا في الأيام ذات التاريخ الزوجي، ويتم الحقن يسارًا في الأيام ذات التاريخ الفردي.

يُحفظ القلم والأمبولات اللاسطوانية في المبرد محمية بعيدًا عن الضوء (يُحظر تمامًا تجميدهم). عند الحفظ في درجة حرارة تتراوح بين ٢ إلى ٨ °مئوية يظل المحلول المتوفر في الأمبولة اللاسطوانية مستقرًا لمدة تصل إلى ٢٨ يومًا بعد الفتح.

يمكن إخراج القلم والأمبولة اللاسطوانية من المبرد قبل الاستخدام بمدة تصل إلى ٤٥ دقيقة.

قبل الحقن في كل مرة، تُغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

لا تُستخدم إبرة الحقن إلا مرة واحدة فقط.

لا يتم إخراج الأمبولة اللاسطوانية من القلم بين الحقنات.

يُمسح القلم بمنشفة مبللة فقط من أجل تنظيفه - ولا يُغمر في الماء نهائيًا، كما لا يُنظف باستخدام الكحول.

لا تُستخدم سوى مناديل الكحول لتنظيف الأمبولة اللاسطوانية.

NUT-AT-000234