



Kurzanleitung für Deinen NutropinAq® Pen



Hilft Dir, Deinen NutropinAq® Pen richtig zu verwenden

Die folgenden Handgriffe dienen der Vorbereitung Deines NutropinAq® Pen auf seinen ersten Einsatz. Deine Eltern werden dir dabei helfen.

Pen-Vorbereitung / Einlegen einer neuen Ampulle



1 Ziehe die grüne Schutzkappe vom Pen und schraube den Zylinderampullenhalter ab.

2 Drücke die weiße Rückstelltaste.



4 Nun drehst Du den schwarzen Dosierknopf ganz wenig im Uhrzeigersinn, bis Du den ersten Klick hörst und drücke den schwarzen Dosierknopf, bis dieser einrastet. Die digitale Dosisanzeige sollte nun 2 Striche anzeigen.



3 Drehe den schwarzen Dosierknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis es nicht mehr weiter geht.



5 Stecke nun die NutropinAq®-Zylinderampulle in den Zylinderampullenhalter und schraube den gefüllten Zylinderampullenhalter wieder in den Pen ein.

Wenn in Deinem Pen bereits die Zylinderampulle eingelegt ist, ist alles ganz einfach!

Bei Deiner täglichen Injektion wiederholen sich nur die Schritte 6 bis 12.



6 Drücke die weiße Rückstellaste.



8 Stelle Deine Dosis ein, indem Du den schwarzen Dosierknopf im Uhrzeigersinn drehst. Wenn Du eine zu hohe Dosis eingestellt hast, drehe den schwarzen Dosierknopf einfach bis zur richtigen Einstellung zurück.

Das Einstellen der Dosis



7 Die digitale Dosisanzeige springt bei erstmaliger Benutzung von den zwei Strichen auf eine blinkende Anzeige mit 0,0 mg. Ist die Zylinderampulle bereits in Gebrauch, dann wird mit der blinkenden Anzeige die Dosis vom Vortag angezeigt; die Anzeige springt nach kurzer Zeit auf 0,0 mg um. Nun kann die Dosis neu eingestellt werden.



Tom erklärt Dir online, wie Du den NutropinAq® Pen richtig anwendest



www.wirwollenwachsen.com

KURZANLEITUNG



9 Wische nun den Gummistopfen der Ampulle mit einem Alkoholtuch ab. Schraube eine frische Nadel auf den Pen und zieh vorsichtig die beiden Schutzkappen von der Nadel.

Die Nadelführung



10 Du hast die Möglichkeit, Deinen Pen mit oder ohne Nadelführung zu verwenden. Die Nadelführung verdeckt die Injektionsnadel während der Injektion und schützt sie vor Beschädigung. Setze die Führung auf den Pen und schiebe die beiden Knöpfe nach vorn.

Die Injektion




11 Drücke die Haut zusammen und setze die Spitze des Pen darauf. Wenn Du die Nadelführung benutzt, drücke den Pen nach unten, bis die Nadelführung zusammengeschoben ist und die Nadel in die Haut sticht. Ansonsten stichst Du die Nadel direkt in Deine Haut. Drücke den Dosierknopf langsam herunter, bis er einrastet und warte 10 Sekunden. Dann kannst Du den Pen wegnehmen.



12 Geschafft! Nun musst Du nur noch die Nadel wieder abschrauben, die Schutzkappe aufsetzen und den Pen im Etui in den Kühlschrank legen!

BESTANDTEILE

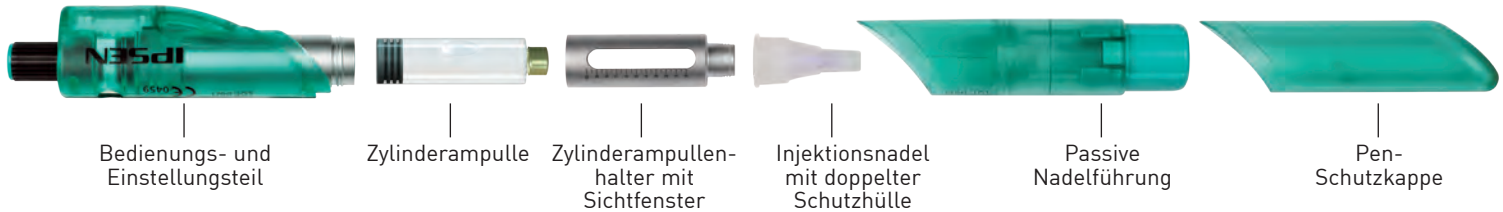

Digitale Dosisanzeige



Schwarzer Dosierknopf



Weißer Rückstellknopf

-
- Dein NutropinAq® Pen ist speziell zum Spritzen von NutropinAq® entwickelt worden.
 - Benutze Deinen NutropinAq® Pen nicht ohne vorherige Anleitung durch eine geschulte Person. Wenn Du Schwierigkeiten mit Deinem Pen hast, wende Dich bitte gleich an die Person, die Dir den Pen erklärt hat.
-

Setze hier Deinen NutropinAq® Pen zur Injektion an Deinem Körper an.



Du musst die Injektionsstelle täglich wechseln!

Wenn nicht immer an derselben Stelle injiziert wird, wird die Haut entsprechend geschont.

— Injektionsstellen im Bauchbereich: Bitte darauf achten, dass diese nicht zu dicht am Nabel ist.

— Injektionsstellen an den Oberschenkeln.

! TIPP: An Tagen mit geradem Datum rechts und an Tagen mit ungeradem Datum links spritzen.

- Pen und Zylinderampullen im Kühlschrank vor Licht geschützt aufbewahren (auf keinen Fall einfrieren lassen!). Bei 2 - 8 °C ist die Lösung in der Zylinderampulle bis zu 28 Tage nach Anbruch haltbar.
- Pen und Zylinderampulle können bis zu 45 Minuten vor Anwendung aus dem Kühlschrank genommen werden.
- Vor jeder Injektion Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Injektionsnadeln nur 1 x benutzen.
- Die Zylinderampulle zwischen den Injektionen nicht aus dem Pen nehmen.
- Den Pen zum Reinigen nur mit einem feuchten Tuch abwischen – auf keinen Fall in Wasser tauchen oder Alkohol verwenden.
- Zur Reinigung der Zylinderampulle nur Alkoholtücher verwenden.

NUT-AT-000204