



Краткое руководство к вашей шприц-ручке NutropinAq®



Поможет тебе правильно использовать
твою ручку-картридж NutropinAq®

Вот таким образом вы подготовите вашу шприц-ручку NutropinAq® Pen для первого использования – ваши родители помогут вам в этом

Подготовка вашей шприц-ручки / Вставляем новый картридж



1 Снимите зеленый защитный колпачок со шприц-ручки и вкрутите фиксатор картриджа шприца.

2 Нажмите белую кнопку сброса на 0.



4 Теперь немного поверните черную кнопку дозирования по часовой стрелке, пока не услышите первый легкий щелчок, и нажмите черную кнопку дозирования до щелчка. На цифровом экране дозирования теперь должно появиться 2 линии.



3 Поверните черную кнопку дозирования против часовой стрелки до упора.



5 Теперь вставьте картридж шприца NutropinAq® в фиксатор картриджа шприца и вкрутите фиксатор картриджа шприца с картриджем внутри обратно в шприц-ручку.

Если картридж шприца уже вставлен в вашу шприц-ручку, все действительно просто!
Для вашей ежедневной инъекции вам нужно только повторять пункты от 6 до 12!



6 Нажмите белую кнопку сброса на 0.



8 Отрегулируйте вашу дозу, поворачивая черную кнопку дозирования по часовой стрелке. Если вы установили слишком высокую дозу, просто поверните черную кнопку дозирования обратно, установив правильное значение.

Регулировка дозы



7 Первый раз, когда вы используете шприц-ручку, цифровой экран дозирования переключается с двух линий на мигающий экран с показаниями 0.0 мг. Если картридж шприца уже используется, мигающий экран показывает дозу предыдущего дня; скоро показания на экране меняются на 0.0 мг. Теперь вы можете отрегулировать дозу.



Том расскажет Вам в режиме онлайн, как правильно использовать NutropinAq® Pen



www.wirwollenwachsen.com

Краткое руководство



9 Теперь протрите резиновую пробку спиртовой салфеткой для дезинфекции. Прикрутите новую иглу к шприц-ручке и осторожно снимите два защитных колпачка с иглы.

Направляющая иглы



10 Вы можете выбрать, как использовать вашу шприц-ручку: с направляющей иглы или без нее. Направляющая иглы закрывает иглу для инъекций во время инъекции и защищает ее от повреждений. Положите направляющую на шприц-ручку и нажмите обе кнопки.

Как сделать себе инъекцию



11 Сожмите кожу пальцами и приложите к ней конец шприц-ручки. Если вы используете направляющую иглы, нажмите на шприц-ручку до тех пор, пока направляющая иглы не сдвинется, и пока игла не проткнет кожу. Если вы не используете направляющую иглы, вколите иглу непосредственно в кожу. Медленно нажимайте на кнопку дозирования до щелчка, а затем подождите 10 секунд. Затем вы можете убрать шприц-ручку.



12 Вы это сделали! Теперь все, что вам нужно сделать, это выкрутить иглу, надеть защитный колпачок и положить шприц-ручку в футляре в холодильник!

Составляющие



Цифровой экран дозирования



Черная кнопка дозирования



Белая кнопка сброса на 0

- Ваша шприц-ручка NutropinAq® была специально разработана для инъекций NutropinAq®.
- Начинайте пользоваться вашей шприц-ручкой NutropinAq® только после того, как специалист, имеющий соответствующую подготовку, объяснит вам, как она действует. Если у вас возникли проблемы со шприц-ручкой, обратитесь, пожалуйста, к специалисту, который объяснял вам, как действует шприц.

Делайте инъекции шприц-ручкой NutropinAq® на следующих участках вашего тела:



Вы должны менять участок для инъекции каждый день! Это защищает вашу кожу, потому что вы никогда не делаете инъекцию в одном и том же месте два дня подряд.

— Участки для инъекций в области живота не слишком близко к пупку

— Участки для инъекций на бедрах

Полезный совет: Делайте инъекцию справа по четным дням и слева по нечетным.

- Храните вашу шприц-ручку и картридж шприца в холодильнике, в защищенном от света месте (но ни в коем случае не замораживайте). При 2 - 8 °C раствор в картридже шприца остается стабильным на протяжении до 28 дней после открытия.
- Шприц-ручку и картридж шприца можно извлечь из холодильника максимум за 45 минут до применения.
- Перед каждой инъекцией тщательно вымойте руки водой с мылом.
- Не используйте иглу для инъекций более 1 раза.
- Не извлекайте картридж шприца из шприц-ручки между инъекциями.
- При загрязнении просто протрите шприц-ручку влажной тряпочкой - ни в коем случае не погружайте шприц-ручку в воду и не протирайте спиртом.
- Спиртовыми дезинфицирующими салфетками протирайте только картридж шприца.

NUT-AT-000230